

GENOKIT®



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

Raccolta del campione:

Non mangiare né bere nei 30 minuti che precedono il prelievo.

Deglutire prima di eseguire il prelievo cercando di raccogliere meno saliva possibile.

1. Aprire il tampone (nel tubo di plastica) fornito nel kit facendo attenzione a non toccare l'estremità cotonata. (fig. 1)
Posizionarlo in bocca, precisamente nella cavità tra la guancia destra e la gengiva.
2. Strisciare bene il tampone nella zona compresa tra la parte interna della guancia e la gengiva per circa 15-20 volte ruotandolo ripetutamente. (fig. 2)
3. Estrarre il tampone dalla bocca e inserirlo nel tubo di plastica, senza mai toccare l'estremità cotonata.
Ripetere l'operazione descritta ai punti 1 e 2 (sul lato sinistro della bocca), con il secondo tampone in dotazione. Inserire poi anche quest'ultimo nel tubo, spezzando l'asta a 3-5 cm dall'estremità superiore. (fig. 3)
4. Chiudere accuratamente il tubo di plastica contenente i due tamponi, scrivere nell'etichetta il nome e la data del prelievo, ed inserirlo nella busta.
5. Completare il questionario in ogni sua parte (le informazioni sono indispensabili ai fini dell'analisi).
Inserire il questionario nella busta che dovrà essere affrancata ed inviata al nostro laboratorio. (fig. 4)

**Il prelievo rapido e non invasivo
per uno Stile di Vita Personalizzato**